

# Mikronadel-Mezotherapie + Mezococktails



# Mikronadel-Mezotherapie + Mezococails



## WIE FUNKTIONIERT ES

Die Mesotherapie ist eine einfache und effektive Behandlungsmethode. Hierbei werden gezielt medizinische Wirkstoffe als Mikroinjektionen in die Haut und Mundschleimhaut verabreicht.

Das Gerät arbeitet mit sterilen Einwegpatronen für Mesotherapie.



12-Nadel Mesotherapiepatrone

In Nanotechnologie vergoldete Silber-Nadeln, garantieren die Reduktion von zereissen des Gewebes und reduzieren die Reibung (Verletzungen) während des Betriebes, verhindert Schwellungen da schnellere Heilung. Bei niedrigen Mikropunktionen in Tiefe von 0,2 mm bis 0,5 mm ist die Behandlung schmerzlos.

In der Mesotherapie dienen flache Einstiche bis zu einer Tiefe von 0,5 mm als Promotorn ( Übertraeger ) für eingesetzte medizinische Wirkstoffe und Kosmetik.

Bei Arbeiten in einer Tiefe von mehr als 0,5 mm kann es zu Mikroblutungen kommen. Bei der Mesotherapie diese Zustand ist sehr wünschenswert.

Tiefe Stiche, mehr als 1 mm, bringen zusaetzlich physiologische Reaktion der Haut, wie beim eine Verletzung, aber auch wie im Falle der fraktionierten, ablativen oder unablativ Laserbehandlung.


Die Haut reagiert auf Mikrostitche wie auf Mikroverlaetzungen. Während des Heilungsprozesses kommt es zu den zahlreichen Phasen der Hautregeneration und zu Stimulieren der Reparaturprozesse, einschließlich der Erhöhung der Teilungsfrequenz der Fibroblasten, die die Produktion von Kollagenfasern, Elastin und Hyaluronsäure erhöhen.

Ohne Mezotherapiemikrostitche dringt nur etwa 0,3% Wirkstoffs in die tiferen Schichten der Haut. Durch Mezotherapiemikrostitche „oeffnen“ wir die Haut für etwa 20 Minuten und ermöglichen das Eindringen von Wirkstoffen in einer um mehrere hundert Mal größer Menge.

Wir bieten Ihnen als Medical Kosmetika Lab Exklusiv-Vertriebspartner an- die medizinische Wirkstoffe MCCM Mezococails zu Mikroinjektionen in die Haut und Mundschleimhaut, und das gilt auch für die Haut sofort nach dem Eingriff Mezotherapiemikrostitchnadelgaraet.



## EINDRINGSCHTICHTIEFE - GESICHTHAUT

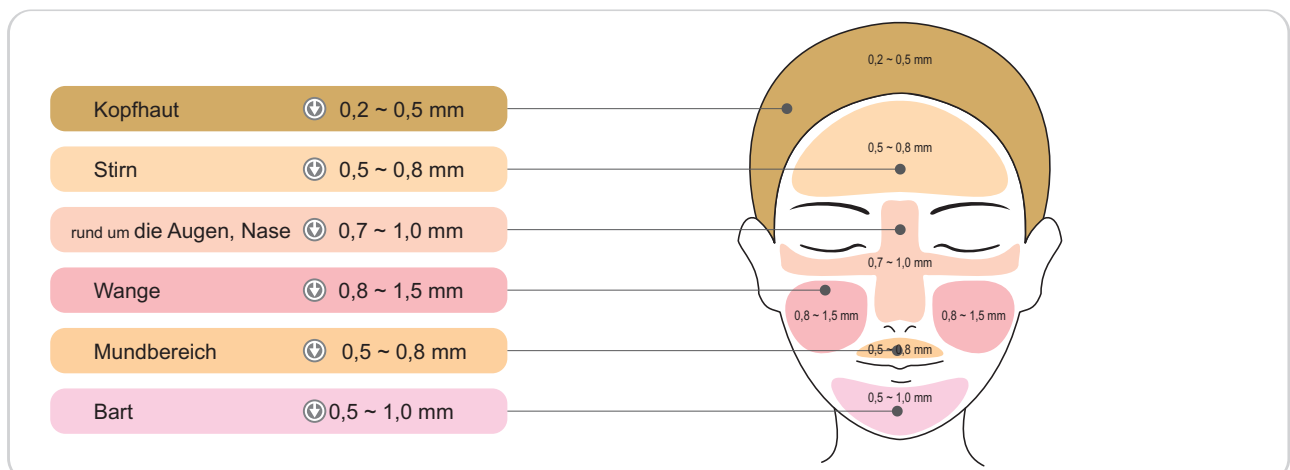

Im Fall der Auswirkung auf den **Körper**, wenn wir es mit Schwangerschaftsstreifen, Cellulite oder lokaler Fettleibigkeit zu tun haben, sollte Einstichtiefe größer als 1,5 mm sein.

## BEHANDLUNGSPROCESS-TIPS

Um verbesserte Ergebnisse zu erzielen, ist es sinnvoll, eine Behandlung mit Hyaluronsäure und Mezococtajlis, die speziell von MCCM Medical Kosmetik-Unternehmen entwickelt sind, um verschiedene Hautprobleme zu lösen, vorzunehmen.



## DAS GESICHT

HAUT-PROBLEME	VERJUENGUNG	VERFAERBUNG	AUGEN	BLUTGEFAESSE	ACNE	NARBEN	HAAR
<b>INDIKATIONEN</b>	Anti-Aging, Falten, dünne Haut, Spannungsverlust und Flexibilität, Befeuchtung und Verdichtung, Revitalisierung	ungleichmäßige Haut Farbe, Haut Flecken, Sonnenhautschaden	Falten, „Augentaschen“, dunkle Ringe unter den Augen	verlängerte Zelle, Erythem, Teleangiektasien	Akne, fette Haut	Narben, Akne-Narben	Alopezie, geschwächtes Haar, seborrhoische Kopfhautentzündung
<b>MEZOCOCTAILS</b>	COLLAGEN Pyruvat 3% der DMEA VITAMIN C 20% Silicon ORGANIC Oligoelemente Hyaluronsäure	VITAMIN C 20% Silicon ORGANIC COLLAGEN Pyruvat	DMAE 3% Silicon ORGANIC GINKBILOBA 4% COLLAGEN Pyruvat	VENOLARETH 0,5% COLLAGEN Pyruvat VITAMIN C 20%	ANTISEBORREICAS Oligoelemente VENOLARETH 0,5% VITAMIN C 20%	Silicon ORGANIC VITAMIN C 20% 3% der DMEA Hyaluronsäure	GINKBILOBA 4% Silicon ORGANIC VITAMIN C 20%



## DER KOERPER

HAUT-PROBLEME	CELLULITE	BODYMODELING	DEHNUNGSTREIFEN und NARBEN	REVITALISIERUNG und REGENERATION	VENDENSTASIS und LYMPHEKANALEN	MUSKEL- und GELENKPROBLEME	DEHNUNG und STRAFFUNG dre Haut
<b>INDIKATIONEN</b>	Multiple subkutane Gewebe, Fibrose, Ödeme im Fettgewebe	Verringerung der lokalen abgelagerte Fettgewebe	Dehnungstreifen und Narben	trockene Haut, mit unebenen Färbung	Ödeme, schwere Beine, schwache die Blut-schiffe, Zusatz zu der Pressotherapie	Schwellungen, Verstauchungen, Schmerzen im Bewegungsapparat -Articular	Spannungs- und Flexibilitätverlust, hängende, geschwächte Haut
<b>MEZOCOCTAILS</b>	MELILOTO COFEINA L-Carnitin Silicon ORGANIC CellControl PLUS GINKBILOBA 4% OLIGOELEMENTE	FOSFOTIDICOLINA MELILOTO COFEINA L-Carnitin Silicon ORGANIC DMAE 3% Hyaluronsäure	Silicon ORGANIC DMAE 3%	Silicon ORGANIC VITAMIN C 20% COLLAGEN Pyruvat Oligoelemente Hyaluronsäure	MELILOTO COFEINA GINKBILOBA 4%	MELILOTO CREMA PARA MASAJE	Silicon ORGANIC DMAE 3% COLLAGEN Pyruvat

Die Behandlungen sind für jedes Alter zu empfehlen, zur Körperrevitalisierung, zu Befestigung und Befeuchtung der Haut, zu Faltenreduzierung, bei Hyperpigmentierung, Akne, Dehnungstreifen und Cellulite, zu Stimulierung der Produktion von Kollagen. Elastin und Hyaluronsäure, gegen Haarausfallen und fuer die Haarverstaerkung.

# Mikronadel-Mezotherapie + Mezococtails



## Zur Verstärkung der EFFECTS - Anschlussvorrichtung für eine Behandlung mit anderen Mesotherapie-TECHNOLOGIEN

Die Vorteile können durch die Kombination der Mikro- Nadel Mezotherapie mit Thermolift, Kavitation, Radiofrequenz, IPL oder Laser-Behandlung maximiert werden .

Nach der Behandlung wird die Bestrahlung mit LED-Lampe empfohlen.



## Die Vorteile der Mikronadel-Mezotherapie

- Anpassbare Mikrostitchtiefen der Mikronadeln im Bereich von 0,2 mm bis 2,2 mm, je nach Problemstellung der Haut über der wir arbeiten.
- Verstellbare Geschwindigkeit, abhängig von der Dicke der Haut und dem zu erwartenden Effekt.
- In Nanotechnologie vergoldete Silber-Nadeln, garantieren die Reduktion von zereissen des Gewebes und reduzieren die Reibung (Verletzungen) während des Betriebes. Darüber hinaus antibakterielle Wirkung durch Silbernadelmaterial.
- Möglichkeit des Betriebs in der Version für Mikronadel-Mesotherapie oder, nach dem Wechsel der Patrone, als eine Vorrichtung zum Permanent Make-up.
- Hohe Drehzahlen - bis zu 120 Schlägen ( Mal 12 Nadeln ) pro Sekunde.
- Die höchsten Sicherheitsstandards - durch austauschbare Patronen.
- Einfache Anwendung auf unebenen und schwer zugänglichen Stellen.

### **Mesotherapie Kit enthält:**

#### **Gerät,**

9 Patronen,

9 Ampullen von 10% Glykolsäure mit Vitamin. E + F

9 Ampullen f. verschiedener Hautprobleme.



Exklusiv-Vertriebspartner:



SZWEDO GROUP s.c.

ul. Meblarska 3

48-200 Prudnik

tel. +48 609 464 114, +48 604 107 995, +48 **601 078 278**

E-mail: [szwedo@szwedogroup.eu](mailto:szwedo@szwedogroup.eu)

[www.szwedogroup.eu](http://www.szwedogroup.eu)

Mikronadel-Mesotherapie bietet die besten Ergebnisse in kürzester Zeit